



### Descripción

Sistema utilizado para administrar aerosoles de tipo médico con tamaño menor a 3 micras, mediante la inhalación directa.

Compuesto por mascarilla con codo giratorio de 360°. Nebulizador y manguera lisa. Adaptador liso.

Set incluye: mascarilla, tubo para oxígeno, nebulizador, adaptador universal.

### Tipo de conservación

Almacenar en ambiente seco, evitar el contacto con la luz solar directa, temperaturas extremas y altos niveles de humedad.

### Operación del equipo

Utilizar siempre por personal capacitado, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las guías clínicas basadas en la evidencia. De este modo, evitará efectos adversos como contaminación cruzada, sobrecarga de líquidos en el sistema vascular, precipitaciones de broncoespasmos y aumento del volumen de las secreciones retenidas.

Utilizar volumen de solución según recomendaciones y administrar flujo entre 6 a 8 litros por minuto, para una adecuada nube. Asegure el adecuado ensamble de las partes.

### Observaciones

Verificar fecha de vencimiento antes de utilizar. Descartar luego de usar de acuerdo a los protocolos instaurados por la institución. No usar si el paquete está abierto o dañado. Cada caja contiene 50 sets.